

Рекомендации

по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации боров «МонАлиТ»

1. После использования вращающегося инструмента (боры, головки), его необходимо сразу погрузить в контейнер с дезинфицирующим средством. Рекомендуется использовать дез. средства, специально разработанные для вращающегося инструмента (роторного – боры, фрезы, головки), это прописано в инструкции. Такие средства отличаются от обычных тем, что не имеют кислотной реакции, которая вызывает коррозионный процесс. При использовании дез. средств следует **СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ** изготовителя относительно концентрации, времени экспозиции и, в случае необходимости, температуры. Неправильно выбранная концентрация, превышение времени воздействия могут привести к повреждению инструмента. Более безопасны для инструмента - дез. средства уже готовые к применению и не требующие дополнительного разведения и содержащие антикоррозийные вещества. Рекомендуется использовать дез. растворы: Актибор (Бозон-Россия); Деконекс Денталь ББ (Борер Хеми АГ-Швейцария); Ротасепт (Шюльке и Майр ГмБХ-Германия); ID 220 (Дюрр Денталь-Орохими-Германия). Эти растворы уже готовы и не требуют разведения. Категорически **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ИНСТРУМЕНТ** под воздействием раствора более чем на 60 мин. (тем более на всю ночь или на выходные дни), во избежание коррозии инструмента. Следите за тем, чтобы ваш раствор хранился в закрытом контейнере. Естественное выпаривание может привести к повышению концентрации р-ра, а это способствует коррозии инструмента. В случае загрязнения р-ра и не своевременной смены его (появление осадка, изменение цвета) возникает вероятность коррозии и снижается эффективность дезинфекции. Способы приготовления раствора, концентрация и время экспозиции указано в инструкции к дез. раствору. **ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.**
2. После замачивания инструмент чистят щеткой с нейлоновой щетиной в том же объеме р-ра, в котором производили замачивание в течение 30 секунд. Для ускорения, повышения эффективности чистки и уменьшения времени контакта инструмента с дез. средством, дезинфекцию рекомендуется проводить в УЗ-мойке. Дез. средство должно быть предназначено для этого (см. инструкцию к дез. средству). После обработки, боры необходимо тщательно промыть под проточной водой в течение 2-3 минут чтобы полностью удалить остатки дез. раствора. Для удаления солей и других примесей, содержащихся в проточной воде, инструмент рекомендуется промыть дистиллированной водой в течение 1 минуты.
3. Перед стерилизацией боры и головки должны быть хорошо высушены. Излишняя влага в процессе стерилизации может вызывать ржавление инструмента.
4. Стерилизацию инструмента можно проводить в автоклаве, сухожаровом шкафу или инфракрасном стерилизаторе в соответствие с инструкцией производителя.
5. Хранить крафт-пакеты с инструментом нужно в сухом и защищенном от света и пыли месте. Нужно следить, чтобы на борах не образовывался конденсат (от перепада температуры).

Рекомендации по использованию алмазных боров «МонАлиТ»

1. Работать борами «МонАлиТ» следует с минимальным нажимом, стараясь максимально охватывать всю обрабатываемую поверхность во избежание его «зарывания» в материал.
2. В случае засаливания инструмента отходами обработки его можно легко вскрыть (очистить), врезаясь в абразивный камень или специальный брусок (выпускается производителем инструмента) на тех же оборотах.

г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала д. 14, к. 4

тел. офиса:

8 (800) 777-94-56

8 (812) 765-05-20

8 (911) 721-86-04

zakaz@akvastom-group.ru

<https://akvastom-group.ru/>